

# アームホルダー J173

## 取扱説明書



このたびは、Mediken商品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。  
安全に正しくお使いいただくため、  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



■ 製品のお問い合わせ      ■ 修理のご依頼  
■ 別売品や消耗品のご注文      ■ 初期不良  
👉 お気軽にお問い合わせください  
Medikenカスタマーサポートセンター

# 使用上の注意—「必ずお読みください」

- 1、本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 2、異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。
  - アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
  - 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 3、次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - 上肢以外の部位に使用しないでください。
  - 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
  - 装着手順に従って正しく使用してください。
  - ショルダーストラップをきつく締めすぎないでください。
  - 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
  - 本品が摩耗、損傷した場合は使用を中止してください。
  - バックルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
  - 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
  - 本品は個人用の製品です。
  - 本品のバックルおよびクリップはポリアセタール製です。負傷事故を防ぐため、人や物との接触がある場合は使用しないでください。
  - 本品の使用中に、怪我、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合はただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

## お手入れ方法

- 本製品は手洗い、または洗濯ネットに入れての洗濯機洗いが可能です。洗濯時の水温は80℃を超えないようにしてください。色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。
- 開封時に異臭を感じた場合は、中身を取り出し、風通しの良い日陰で1～2時間放置し、自然に揮発させてください。

# 各部の名称

## 「製品の表側」



## 装着手順—「左腕の場合」

### 「本品は左右兼用です。」

- 装着前に本取扱説明書P.1の【使用上の注意】をよく読んでから手順通り正しく装着してください。



- 1、肘をスリングに奥までしっかりと入れます。



- 2、ショルダーストラップを、左肩の後方から背中にまわし、反対側の肩にかけます。



- 3、バックルの凸側を、凹側にカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

その際、バックルから出ているショルダーストラップの先端を前側に向けます。



4、ショルダーストラップが長い場合は先端を上  
に引っ張って締めます。

ストラップの当たりが気になる場合は、  
パッドの位置を調節してください。



5、バックルを外側に引っ張って緩めます。



6、肘の角度が90度になるよう調節します。

● 本体のゆるみやずれがないか、確かめてください。  
違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

## 仕様

商品名	アームホルダー
型番	J173
外形寸法	約40×18.5cm (±0.2cm)
ストラップの調整範囲	約0~62cm
採用素材	ナイロン75%・ポリウレタン25%

※お願い:本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## お問い合わせフォーム



製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。さらに、SNSをフォローしていただくと、お得なキャンペーンや限定情報をご覧いただけます。

HP:<https://www.mediken.net/>

Line: @mediken

Email: [support@mediken.net](mailto:support@mediken.net)