

ノーズリフレ鼻洗浄剤取扱説明書

主成分：塩化ナトリウム

内容量：2.7g/包

【使用上の注意】

[重要]

- ・鼻・耳の炎症、鼻づまりがひどい場合は、ご使用前に専門医の指導を受けてください。
- ・使用後に鼻を強くかまないでください。
- ・子供は保護者の指示のもとで使用する事。
- ・本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ・開封したものは一度で使い切ってください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。

【使用目的又は効果】

洗浄液を鼻腔に噴出によって、鼻腔内の埃等を除去し、鼻腔内の衛生を維持の目的としてます。

【使用方法】

- ①300mLのぬるま湯にノーズリフレ鼻洗浄剤を1包(2.7g)を入れ、よく溶かしてからご使用ください。
- ②使用後、洗浄液が残った場合は、衛生のために破棄してください。
- ③本品は医薬品ではないため、1日に複数回ご使用いただけます。
- ④ご使用前には必ず鼻洗浄器の取扱説明書をご確認ください。

【医療機器に関する記載】

本製品（ノーズリフレ鼻洗浄剤）は、「ノーズリフレ鼻用洗浄器 ME119」の付属品として、以下の一般医療機器に含まれ、すでに医療機器届出を完了しています。

一般医療機器 器55 医療用洗浄器

一般的名称：家庭用鼻腔洗浄器

届出番号：13B2X10479302042

【保管方法および有効期限】

- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・ノーズリフレ鼻洗浄剤の有効期限：製造日より3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町111

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.

(中華人民共和国：China)



製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
さらに、SNSをフォローしていただくと、お得なキャンペーンや限定情報をご覧いただけます。

HP：<https://www.mediken.net/>

Line : @mediken Email : support@mediken.net