

Ver 1.0

製造届出番号：13B2X10479302010

機械器具(22) 検眼用器具

一般医療機器 瞳孔計JMDNコード：13236000

# LEDペンライト (瞳孔計付) 取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください。

## 【形状・構造及び原理等】

### ・形状・構造



### ・原理

本品は、一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるペン型で、先端に白色・黄色のLEDライトがある。

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具である。


本品の側面に瞳孔の大きさを示す円(瞳孔計)が表示される。

本品は、スライドスイッチにより、白色・黄色LEDランプ切り替えによるバリエーションがある。

## 【使用目的又は効果】

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具をいう。

## 【各部の名称】

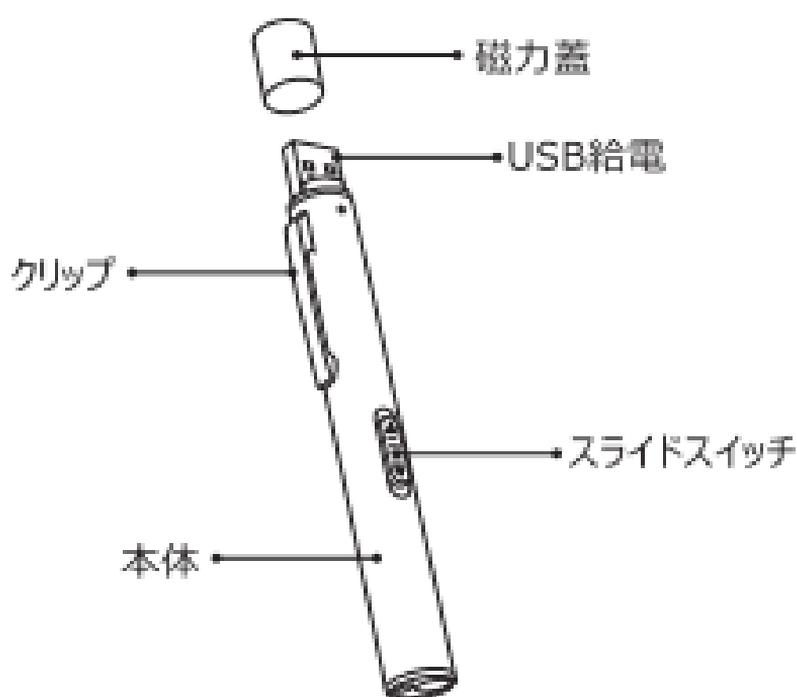

## 【製品仕様】

商品名	LEDペンライト(瞳孔計付)
電源	USB充電タイプ
ライト色	白色・黄色
色温度	5000K
動作時間	3-5時間
材質	ステンレス
長さ	130mm
直径	14mm
重さ	20g

## 【使用方法等】

- 1.本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にする。
- 2.本製品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを対比的に観測して測定する。
- 3.スライドスイッチをLED側に引くと白色が点灯する。
- 4.スライドスイッチをクリップ側に引くと黄色が点灯する。

5.計測を終了しスライドスイッチを中に戻すとLEDライトが消灯する。

使用動画をご用意しております。

QRコードをスキャンしてご利用ください。

<https://www.youtube.com/shorts/aywr6DPEKZY>



### 【使用方法等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

### 【使用上の注意】

- 1.長期間使用しない状態で再度使用する場合は、充電してから使用してください。
- 2.万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないでください。
- 3.眼に近づけてライトを発光させないこと。また、目の測定の際、LEDライト色は黄色を使用してください。
- 4.使用前に汚れ、破損等を点検してください。

### お問い合わせフォーム

商品の使用上何かご質問がございましたら、

QRコードをスキャンしてご利用ください。

スタッフ一同、全力でサポート

させていただきます。

リンク：<https://tayori.com/f/otoiawase1/>



### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)