

Ver 1.0

製造届出番号：13B2X10479302012

機械器具(22) 検眼用器具

一般医療機器 瞳孔計 JMDNコード：13236000

# LEDペンライト (瞳孔計付) 取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください。

## 【形状・構造及び原理等】

### ・形状・構造



### ・寸法/重量

| 全長     | 直径   | 重量             |
|--------|------|----------------|
| 12.6cm | 15mm | 38g<br>(乾電池含む) |

### ・原理

本品は、一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるペン型で、先端に黄色のLEDライトがある。

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具である。


本品の側面に瞳孔の大きさを示す円(瞳孔計)が表示される。

本品は、クリップスイッチによりクリップスイッチを押すとライトが点灯する。

## 【使用目的又は効果】

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具をいう。

## 【各部の名称】

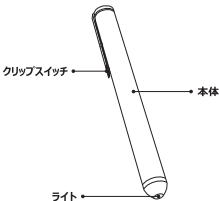

## 【使用方法等】

- (1)本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にする。
- (2)本品下部ライト部を右に回し、そのまま単4電池（AAA電池）2本を入れる。
- (3)下部ライト部がしっかり閉まっていることを確認する。
- (4)上部クリック部を押すとライトが点灯する。
- (5)計測を終了しスイッチを離すとLEDライトが消灯する。

## 【使用方法等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

## 【使用上の注意】

1. 長期間使用しない状態で再度使用する場合は、洗浄・消毒等を行ない清潔にしてください。
2. 万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないでください。
3. 使用前に汚れ、破損等を点検してください。

### お問い合わせフォーム

商品の使用上何かご質問がございましたら、

QRコードをスキャンしてご利用ください。

スタッフ一同、全力でサポート

させていただきます。

リンク：<https://tayori.com/f/otoiawase1/>



## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)