

Ver 1.1

製造届出番号：13B2X10479302025

一般医療機器 眼鏡 ME090

# スイミングゴーグル 取扱説明書



**ご使用前に必ずお読みください。**

## 【形状・構造及び原理等】


### ・形状・構造



スイミングゴーグル ME090

眼鏡レンズとシリコン製フレームからなる視力補正用ゴーグル型の眼鏡である。

### ・寸法/重量

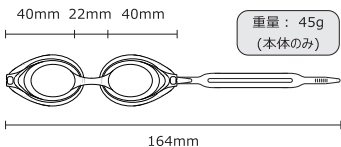

### ・原理

本品は、補正用レンズにより、視力を補正する。

(参考目安)

視力	0.2以上		0.1	0.1以下	
度数	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0

## 【使用目的又は効果】

本品は、プールなど水中において、適切な度数のレンズが入ったゴーグル型の眼鏡を装着することにより視力を補正する場合に使用する。

## 【パッケージ内容】



① スイミングゴーグル  
(度付き)



② 専用ケース



③ 耳栓(L+R)



④ 鼻ベルト(S、M、L)



⑤ 取扱説明書

## 【装着方法】

### ・鼻ベルトの取り外す方



① ゴーグルの内側を上にして片手で持ち上げます。



② もう一つの手で鼻ベルトを握って、親指を鼻ベルトとレンズの接続部に置き、そこを支点にして鼻ベルトを少し下に曲げながら、鼻ベルトを取り外します。

### ・鼻ベルトの付ける方



① 片手にゴーグルの片レンズ、片手に鼻ベルトを持ち上げます。



② 鼻ベルトの先端を接続部の穴に合わせ、強く押し込みます。

※鼻ベルトは強度のある素材を採用したため、鼻ベルトが変形しても元に戻れます。外せない時は少し力を入れても構いません。

## 【使用方法等】

1)ゴーグルを目に当てる。



レンズカップの内側クッション部分が顔に触れるようにする。レンズ自体を手で触れないようにする。

2)ストラップを後ろに引っ張る。



片手で目元に押し当てたまま、もう片方の手でストラップを取り、目の高さになるように頭の後方に固定する。

3)ストラップを調整して密着する位置で固定する。



側面から見たときにストラップとレンズカップのラインが平行になっている状態にする。

## 【水泳用ゴーグルのお手入れ方法】

正しい使用方法によって水泳用ゴーグルの使用寿命を延ばすことができます。

①



- レンズ自体を日々清潔に保ってください

②



- 使用後は、必ず水でよくすすぐように洗い、水を振り切って陰干しをしてください。

③



- 傷がつかないように注意しながら、柔らかい布（例：マイクロファイバークロス）などでレンズ面の水分を押し取るように吸い取ってください。

④



- 乾燥させてから、付属の収納ケースに入れて清潔な場所に保管してください。

## 【注意】



- **アルコールを使用しないでください。**シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用すると、変形や変色の原因となりますので使用しないでください。



- **指でこすらないでください。**レンズ内側はキズがつきやすいので、指やタオル等でこすらないでください。



- レンズの内側を水道水で直接すすがないでください。



- プールの水や水道水、海水、温水等に長時間浸けたままにしないでください。



- サウナで使用しないでください。



- 熱いシャワーで使用しないでください。



- 夏場の直射日光下で使用しないでください。

夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室等、極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能劣化の原因となりますのでご注意ください。



- 水に濡れたまま長時間放置しないでください。

カビなどが発生することおそれがありますので水に濡れたまま長時間放置しないでください。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光や高温多湿を避けた場所に保管してください。

## 【使用上の注意】

- 1.本品は、水泳専用のゴーグル型眼鏡です。水泳以外での目的では使用しないでください。特に潜水用としての使用は危険です。目の周りが強く圧迫され、目を損傷する恐れがあります。
- 2.使用前に必ず各部を点検してください。
- 3.本品を付けた状態でレンズを顔の前に必要以上に引っ張らないでください。ベルトの伸縮でレンズが顔や目に当たり、けがをする恐れがあります。
- 4.陸上やプールサイドでは、本品を必ず外してください。障害物などに当たり、けがの原因となります。体調が悪いときは、重大な事故の原因となりますので、使用を中止してください。
- 5.本品は、衝撃などから、目を保護するものではありません。使用中は、周囲の安全を確認してください。
- 6.使用中に疲れ・頭痛・吐き気など異常を感じた時、または、症状が改善しない場合は、眼科医にご相談ください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

<製造業者>

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (CHINA)