

# メディケン 聴診器ME095 取扱説明書

mediken


一般医療機器 製造販売届出番号:13B2X10479302028

この度はメディケン聴診器をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

## ▲ 注意事項

- ・使用目的以外の目的では使用しないでください。
- ・本品を分解・改造しないでください。
- ・すべての部品が装着されている状態で正しくご使用ください。
- ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないでください。
- ・消耗品等の各部品を交換される場合は、本製品用純正部品のみご使用ください。
- ・材質に過敏症がある患者には使用しないでください。
- ・故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行ってください。

## 各部の名称

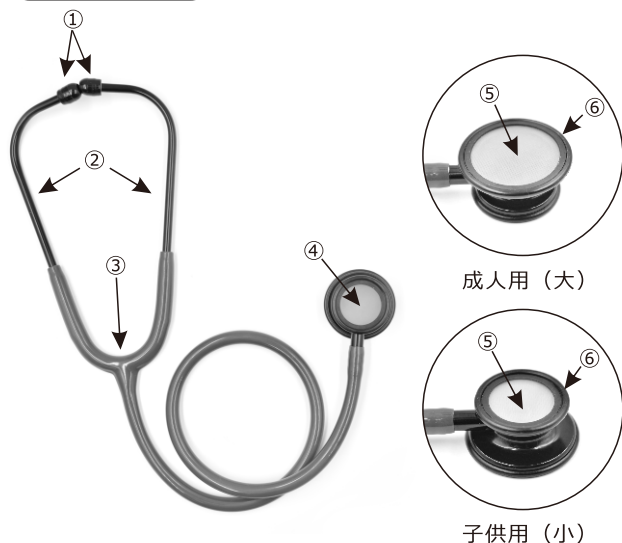

- ① イアーチップ
- ② 耳管
- ③ Yチューブ
- ④ チェストピース
- ⑤ ダイアフラム
- ⑥ ダイアフラムリング

成人用 (大)

子供用 (小)

## 付属品一覧



ダイアフラム (2枚)

イアーチップ (2セット)

ネームタグ (1個)


- ※サイズの異なるダイアフラムが4枚付属されています。  
2枚はあらかじめ装着されており、2枚が同梱されています。
- ※同じサイズのイアーチップが3セット付属しております。  
1セットがあらかじめ装着されており、2セットが同梱されています。

## 使用方法

1. 耳管の向きを確認し、耳管を広げて適切な方向でイアーチップを耳孔に挿入します。  
耳管は15度の傾斜角度でデザインされています。図のとおり正しく取り付けてください。




○正しい取り付け方

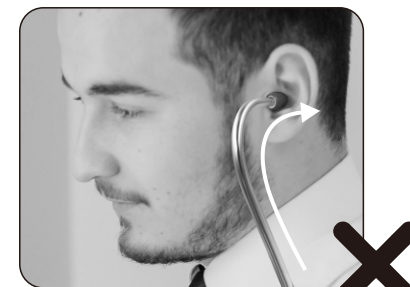


×誤った取り付け方

2. 本品のチェストピースはダブル型です。大きなダイアフラム面と小さなダイアフラム面があります。ダイアフラム面の切り替えはシャフト（チューブとチェストピースの接合部）またはチェストピースを回して行います。シャフトに丸形の印があり、聴診したい面を印のある面に向けて回転させてください。

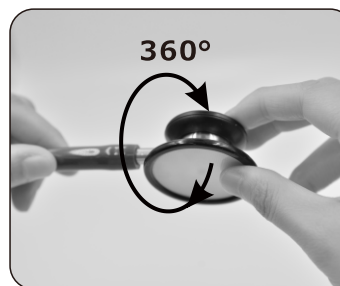

シャフト360°回転可能

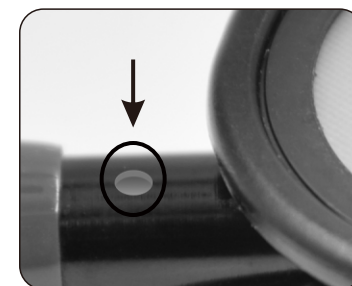


丸形の印

3. チェストピースの当てる強さによって低・高周波音を切り替えて聴診可能です。低周波音を聴診するには、チェストピースを皮膚に軽く押し当り、高周波音を聴診するにはチェストピースを皮膚に強く押し当ててください。
4. 耳管を広げて使用者の耳孔からイアーチップを外します。

## 耳管の調整

Yチューブの中心部にスプリングが内蔵されています。

1. 左右のイアーチップが水平に揃わない場合  
左右の耳管を持ち、上下に動かして合わせてください。
2. 耳管の締め付けが強い場合  
Yチューブの中心部を握って、親指で押しながら軽く圧力をかければ耳管が徐々に外側の方向に開きます。使いやすい張力が得られるまで調節してください。

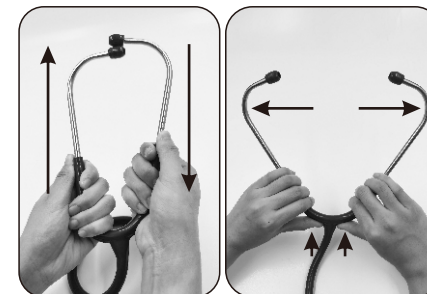

1

2


### 3. 耳管の締め付けが弱い場合

#### 方法①：

耳管の先端部を両手でしっかりと握って、耳管を交差させ、外側に向けて徐々に引っ張ってください。使いやすい張力が得られるまで調節してください。

#### 方法②：

Yチューブの中心部を片手で絞ってください。使いやすい張力が得られるまで調節してください。

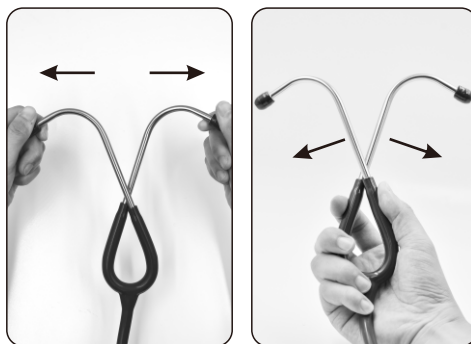

方法①

方法②

### ※ご注意：

- ・力が強すぎると耳管とYチューブが外れる可能性があります。適切に調整してください。
- ・耳管を極端に調整することにより、スプリングの張力が緩む恐れがあるためご注意ください。

## 部品の交換

### 1. イアーチップの交換

- (1)取り外す際は、イアーチップを掴み、回しながら引き抜く様にして耳管から外してください。
- (2)取り付ける際は、イアーチップを耳管の先端を覆うように装着し、しっかりと深く押し込んでください。

### 2. ダイヤフラムの交換

- (1)ダイヤフラム面の裏側から、爪でダイヤフラムリングを外します。外したダイヤフラムリングからダイヤフラムを取り外してください。
- (2)新しいダイヤフラムをダイヤフラムリングの溝に差し込みます。
- (3)ダイヤフラムを取り付けたダイヤフラムリングをチェストピースに取り付けます。ダイヤフラムリングの縁の一部をチェストピースに差し込み、指で押さえながら全体的に取り付けていきます。ダイヤフラムリングがしっかりとハマっていることを確認してください。

## 消毒・保管方法

### 1. 消毒

- (1)消毒用エタノールまたは中性洗剤に浸した綿で本体を拭き、よく乾かしてください。
- (2)イアーチップは、定期的に綿棒などで汚れを取り除いてください。
- (3)液体に浸したり、すすいだり、スチーム消毒、滅菌処理などをしないでください。また、直接高温、溶剤、低温、オイル等と接触させないでください。

### 2. 保管

- (1)涼しく換気の良い場所で保管してください。
- (2)腐食性のある品物と一緒に置かないでください。
- (3)過圧がなく、地面から200mm以上の高さにおいてください。

## メディケン 聴診器 品質保証書

医療機器添付文書ならびに取扱説明書による通常のご使用において、万一、故障や破損した場合、**本体のみ（チェストピース、耳管、Yチューブ）を1年間無償交換対象といたします。**

※消耗品（ダイヤフラム・ダイヤフラムリング・ベルリング・イアーチップ）は保証対象外とさせていただきます。消耗品はご購入の販売店よりお求めいただけます。

### 保証規定

- (1)保証期間内に故障が発生した場合、故障品に本証を添え販売店または製造販売元までご依頼ください。
- (2)下記の場合は保証期間内でも有償となります。
  - I、誤使用により発生した故障
  - II、火災、地震、水害など天災地変、その他不可抗力による故障および損傷
  - III、故障の原因が本品以外に起因する場合二、注文番号と販売店名のご提示がない場合

品名または型番	メディケン聴診器 ME095		
販売店名			
注文番号			
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より本体1年
お客様名	お名前		
	電話番号		
	ご住所		

備考欄



■製品のお問い合わせ ■修理のご依頼  
■別売品や消耗品のご注文 ■初期不良  
☎お気軽にお問い合わせください  
メディケンお客様サービスセンター  
<https://tayori.com/f/stethoscope/>

  
**mediken**