

取扱説明書


歯鏡 LEDライト ME100

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

【形状・構造及び原理等】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具です。

LEDランプがついており、使用時に点灯します。

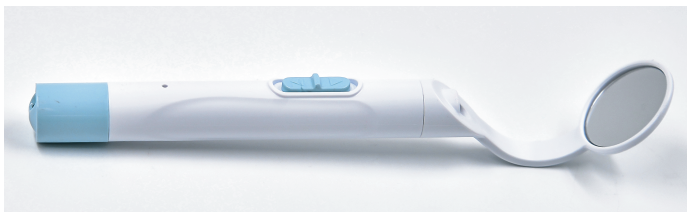

・寸法/重量

全長	直径	重量
15.5cm	25mm	11.5g

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具です。

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にしてください。
- 2) ケースから取り出し、LEDランプを点灯し口腔内を反射鏡として使用します。
- 3) 使用後、LEDランプを消灯しケースに収納してください。


【充電方法】

1. デンタルミラーの端にある青色の蓋を取り外します。
2. USBプラグを市販のACアダプタまたはパソコンのUSBポートに差し込みます。

充電中：青色のインジケータランプが点灯する


充電完了：インジケータランプが消灯する

3. 充電完了後、蓋を閉めます。

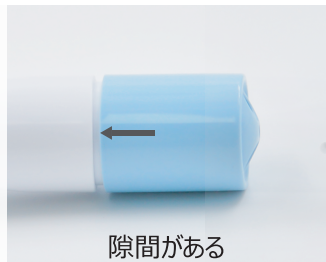

隙間がある

×

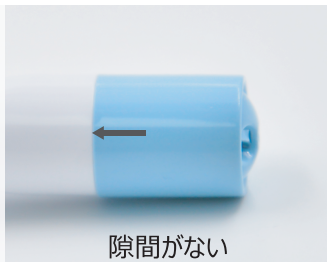

隙間がない

○

ご注意：蓋と本体の隙間がないように、蓋を奥までしっかり閉めてください。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け風通しが良く、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

保管期間：1年

【使用上の注意】

1. 長時間使用しない場合は、定期的に充電してください。
2. 使用前に汚れ、破損等を点検してください。
3. 曇り止め加工の兼ね合いで、強く噛んだり、擦ったりするとフィルムが割れてミラーが見えづらくなる場合がございます。
4. アルコールに長時間つけると曇り止め加工が取れてしまう場合がございます。
5. ケアの際にお水で優しく洗い流し、シートでふき取ってください。
6. LED発光部を直視しないでください。
7. 本品は口腔ライト用途以外に使用しないでください。
8. 本体部分に水が入ると故障の原因になります。水につけたり、濡らすことは絶対におやめください。
9. ご使用前に、割れや欠けがないかお確かめの上、ご使用ください。割れや欠け、折れが発生した場合は使用を中止し、破棄してください。
10. 本品に強い衝撃を与えたり、無理に折り曲げると不点灯の原因になるのでおやめください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)