


mediken

電動鼻用洗浄器ME117

取扱説明書

届出番号：13B2X10479302041

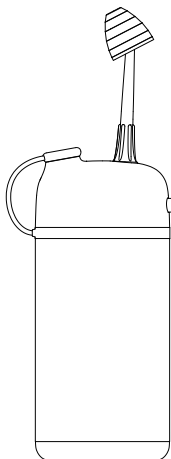

このたびは、メディケン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ございます。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず
お読みください。



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加

👁️お気軽にお問い合わせください

- | | |
|---------------|----------|
| ■ 製品のお問い合わせ | ■ 修理のご依頼 |
| ■ 別売品や消耗品のご注文 | ■ 初期不良 |

目 次

必ずお読みください

安全上必ず守ってください.....	02
使用上のご注意.....	04
使用目的、効能または効果.....	05
商品の構造.....	06

充電方法

低電量警告ランプ.....	07
充電について.....	07

使用方法

準備.....	08
使い方.....	08
ご使用後は.....	13
お手入れ方法.....	14

困ったときに

「故障かな？」と思ったら.....	15
主な仕様.....	17
記号用語集.....	17
保証とアフターサービス.....	18

必ずお読みください

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



- 改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。



- 充電前に、充電口に水がないように確認する。

充電口に水がありましたら、短絡（ショート）の恐れがあります。



- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれがあります。



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電やけがをすることがあります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災・発火の原因になります。



- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりした状態で保管しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

	● 鼻の洗浄以外の目的に使用しない。 目や耳などに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。
	● 以下の場合には使用しないこと。・目、耳、口腔には使用しないこと。 ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。 ・口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。 ・耳鼻科及び眼科の疾患がある方や過去にあった方は、専門の医師に相談の上使用する。 ・鼻腔内に創傷がある場合や塩化ナトリウム代謝障害者と、アレルギー体質がある場合は医師に相談の上、使用すること。 ・鼻を充分にかめない場合は使用しないこと。 ・風邪や鼻づまりがひどい時は使用しないこと。
	● 使用中に万一、お体(耳・鼻・目など)に何らかの異常や不調が生じたり感じられたときは、直ちにご使用をやめて医師に相談する。 健康を害する原因になります。
	● 高齢者・小児・乳幼児や自分で操作ができない方、鼻の粘膜が弱い方などは使用しない。 お子様は保護者の指示のもとで使用する。けがの原因になります。
	● 機器を常に清潔にし、鼻の洗浄をするときは、新しい温水を使用する。 不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。

	● 使用後は必ずウォータータンクに残った生理食塩水を捨て、ウォータータンクに新しい水を入れ運転して、ノズル、ポンプ内などの塩分をきれいに洗い流す。 塩分をきれいに洗い流さないと塩カスがつまり、噴射しなくなります。不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。
	● 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

使用上のご注意


- 本品は原則として同一患者使用のため、他の患者に使用しないでください。交差感染を防止する為に、他の人と共用しないでください。
- 直射日光の当たる所、湿気の多い所、水のかかる所、高温の所での保管はしないでください。
- 本体の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふきとり、シンナーやベンジン等の使用はプラスチック部分を傷めますので、絶対に避けてください。
- 機器を煮沸消毒しないでください。プラスチック部分を傷めます。
- 周囲温度が5℃以下または40℃以上の時は使用しないでください。
- 機器を爆発物、可燃液やガスの近くで使用しないでください。

- お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 本品の使用前後は必ず洗浄をすること。
- 本品は屋内での使用を意図しているため、屋外で使用しないこと。
- 清潔で風通しが良く、高温、多湿、埃、有毒ガスや腐食性ガスのない環境で使用する。
- ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。使用後は、ノズルとウォータータンクを洗浄すること。
- ご購入時に本体内部(ウォータータンク等)に水滴が付着していることがありますが、これは性能(水流)テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上の問題はありません。


使用目的、効能又は効果

洗浄器として、鼻腔内及び鼻の奥の洗浄を行い、鼻の働きを良くする。花粉症の緩和・アレルギー性鼻炎の緩和・風邪の予防と緩和。一般家庭で使用する。

商品の構造

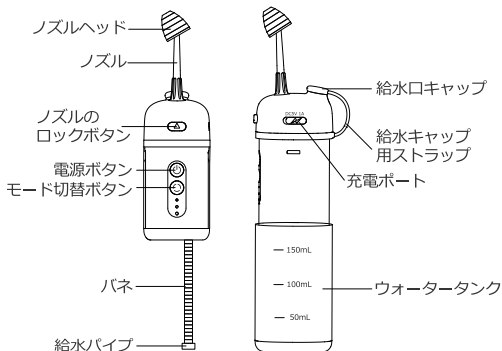

付属品

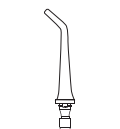


取扱説明書（本書）x1

充電方法

低電量警告ランプ

電池残量不足の場合(電圧< 3.1V)は噴霧が停止され、使用してるモードのランプ点滅します。その場合は充電してからお使いください。

充電について

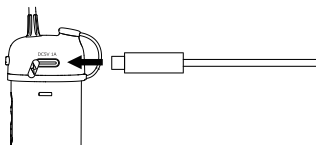

充電前に、充電ポートに水あるいは塩の結晶があるかどうかご確認ください。水あるいは塩の結晶がありましたら、短絡(ショート)の恐れがあります。付属の充電ケーブルのType-C側を本体の充電ポートに差し込み、USB側を**市販のPSE済みACアダプタ(定格出力DC5V 1A)**に接続してコンセントに差し込んでください。

充電中にランプはゆるく点滅します。充電完了後ランプは常時20分間点灯してから消灯します。コンセントからACアダプタを取り外し、ケーブルを本体から取り外してください。充電口の保護カバーをしっかりと閉めてください。

注意：

- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差しをしないでください。
- 電源ケーブルを抜く時は、ケーブルを持たず必ず先端のUSBプラグを持って引き抜いてください。
- 充電しながら使用しないでください。
- 過充電を防ぐために、必要以上に充電しないでください。また、過放電を防ぐために、長時間使わない場合は3ヶ月に1回充電してください。

使用方法

準備

初めてご使用になるとき、あるいは長期間使わないで保管されたときは、一度水を通してからご使用ください。

※吸水パイプ、ノズルとノズルヘッドに異物付着がないことを確認してください。

使い方

(1) ノズルヘッドをノズルに取り付ける

ノズルとノズルヘッドが各2型があります。噴霧型ノズルがミストが出て、子供（8歳以上）と初心者に向けています。水柱型ノズルは水柱が出て大人に向けています。子供用と大人用ノズルヘッドが付属します。自分に合ったノズルとノズルヘッドを選んで取り付けてください。

ノズルとノズルヘッドについて


ノズル	 噴霧型	 水柱型
	 子供用	 大人用
取り付け方法		

注意：

- ノズルヘッドの最後までしっかり取り付けてください。正確に取り付けないと液漏れの恐れがあります。

(2) ノズルを本体に取り付ける

図のようにノズルを本体に取り付けます。成功に取り付けると、「カチッ」という音が聞こえます。

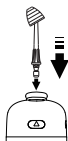

注意：

- ノズルの下部分にホワイトのシールリングがあります。シールリングが正しく取り付けないか確認してください。正確に取り付けないと液漏れの恐れがあります。







(3) ウォータータンクに食塩温水を注入する

方法1：ウォータータンクから注入

① ウォータータンクを取り外す	② 食塩温水を注入する	③ ウォータータンクを取り付ける

方法2：給水口から注入

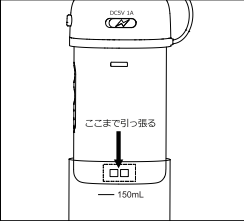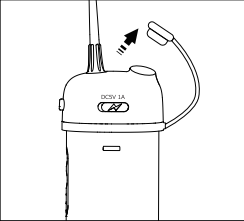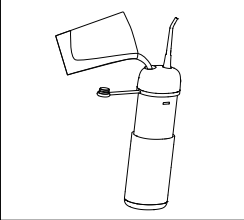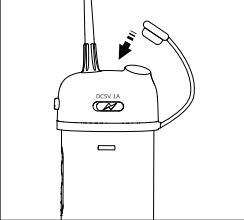① ウォータータンク を下に引っ張る	② 給水口のキャップ を開ける
	
③ 食塩温水 を注入する	④ 給水口のキャップ を閉める
	

注意：

- 0.9%の食塩温水（温度：約36～37℃）で鼻を洗浄することをおすすめします。または医師の指示のもとに洗浄液を選びください。40℃以上のお湯は使わないでください。
- 最大容量150mLを超えないようにしてください。初回使用の場合は100mLの注入をおすすめします。
- ウォータータンクを取り付ける時に、ゆっくりして指を挟まないようにご注意ください。

(4) 洗浄器を持ち上げ、ノズルヘッドを軽く片側の鼻孔に入れて、 電源ボタンを長押しして「エー」と言いながら洗浄する



洗浄の前に、自分の状況に応じて噴霧型ノズルあるいは水柱型ノズルを選んでください。

電源を入れると、標準動作モードに入ります。初めて使用する際は「弱モード」を選択してください。洗面台の上にかがみ、口を開けてゆっくりとノズルを鼻の穴付近に合わせます。（最初は噴霧型ノズルを鼻孔に直接塞ぎしないでください。）

両方の鼻孔が通っている場合、噴霧型ノズルを使用することができます。片方の鼻孔をゆっくり塞いで、「エー」と言いながら洗浄して、生理食塩水がもう一方の鼻孔または口から流れ出るようにします。自分の状況に合わせて強さを調整してください。

使用時に片側または両側の鼻が詰まっている場合、噴霧型ノズルを使用して洗浄すれば、鼻腔や中耳に圧力を感じて、生理食塩水がもう一方の鼻孔または口から出ない恐れがあります。この場合はまず水柱型ノズルを使用して洗浄してください。生理食塩水がもう一方の鼻孔または口から流れ出れば、鼻腔が開通していることが確認できます。この時、鼻全体を徹底的に洗浄できます。

注意：

- 鼻洗浄中、器具を45度以上傾けないでください。液漏れの恐れがあります。
- 必ず発声してください。食塩温水あるいは洗浄液が気管に入ってしまうのを防ぎます。
- もし洗浄ノズルで左の鼻孔を塞いだ場合は、頭を右側に向けて、右の鼻孔から水が流れ出るようにし、唾を飲み込む動作を避けてください。逆の場合も同様です。使用中は話さないでください。常に口を開けて呼吸を続けてください。
- もし何度試しても水流がもう一方の鼻孔や口から流れ出ない場合は、鼻腔の圧力が過大になり、怪我を防ぐために使用を中止してください。
- 耳に圧力がかかり過ぎることを防ぐためノズルヘッドと鼻孔は密閉せず、少し隙間を空けてご使用ください。

(5) ○モード切替ボタンを押して、「強」、「中」、「弱」モードを切り替える

初めての方は「弱」を推奨します。

噴霧型ノズルと水柱型ノズルの流量

モード	噴霧型ノズル	水柱型ノズル
強モード	60 (±20) mL/min	265 (±50) mL/min
中モード	50 (±20) mL/min	220 (±40) mL/min
弱モード	40 (±20) mL/min	155 (±30) mL/min

注意：

- 使用中に万一、耳・鼻・目などに何らかの異常や不調が生じたり感じられたときは、直ちにご使用をやめて医師に相談してください。
- 安全の為に電源オンしてから2分間後自動的に電源オフします。もし食塩水があればまた○電源ボタンを長押しして洗浄してください。片側の鼻孔を洗浄する時間は4分間を超えないようにおすすめします。隙間おかず30分間以上連続使用しないでください。

(6) 電源ボタンを一回押したら洗浄が停止される

ノズルを鼻孔から外す前に、必ず電源を切ってください。
そうしないと、水流が周囲に飛び散る恐れがあります。

片側の鼻孔を洗浄した後、もう一方の鼻孔も同じ方法で洗浄します。鼻洗浄が完了してから軽く鼻をかんで鼻の内部に残った洗浄水を出してください。

(7) 子供の使用方法

8歳以下の子供には使用を推奨しません。8歳以上の子供は必ず大人の指導の下で使用してください。

子供は身体が発育途中であり、鼻腔の発育が完全ではないため、大人と比べて鼻腔の構造が短く小さいです。そのため、使用方法も大人とは異なります。**使用時は、噴霧型ノズルと子供用ノズルヘッドをおすすめします。**

子供の耐性に応じて、水圧の調整を安全かつ合理的に行ってください。


子供が操作する際、大人は無理に使わせてはいけません。強制すると反発心理が生まれ、使用に協力しなくなることがあります。その結果、効果も十分に発揮されません。ですので、安全かつ適切に子供を指導し、規則正しく使用させることが重要です。継続的に使用すれば、効果が現れるでしょう。

また、最初に大人が製品の正しい使用方法を習得し、その後に子供の使用を導くことをお勧めします。これにより、子供の使用がより安全で適切に行われることが保証されます。

ご使用後は

ウォータータンクに新しい水を100mLぐらい入れて電源ボタンを長押しし、水がなくなるまで噴射してください。(洗浄液、食塩は残留しないでください)。ノズルとウォータータンクを取り外して水分をふき取り、充分乾燥させてから保管してください。

ノズルとウォータータンクの取り外し

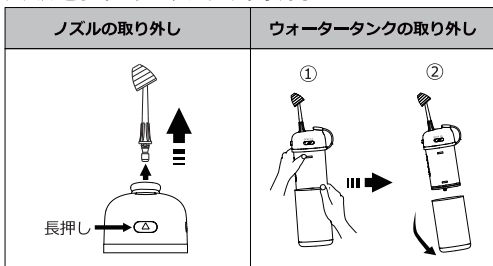

注意：

- ノズルのロックボタンを長押ししてノズルを取り外してください。
- ウォータータンクの取り外し：図1のように左手で製品本体を持ち、右手の人差し指で少し下に押しながらタンクを下に引きます。同時に、図2のように右下方向に反時計回りに力を入れて引っ張ることで簡単にタンクを取り外すことができます。
- 十分に洗浄しなく、充分乾燥しないと雑菌などの繁殖の原因となります。また塩の結晶が目詰まりして噴射できなくなるおそれがあります。

お手入れ方法

注意:機器の煮沸消毒はしないでください。

各部品をきれいに洗った後、乾燥させてから保管してください。温度湿度の高いところや直射日光の当たる所に置かないでください。

本体

やわらかい布で汚れをふき取ります。

※洗剤、薬品、シンナー、ベンジンなどは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので絶対に使用しないでください。

ノズル

ノズルを本体から取り外し、水洗いしてください。

※水洗い後は、水分をふき取り水をよく切ってください。

ウォータータンク

ウォータータンクを本体から取り外し、水洗いしてください。

※水洗い後は、水分をよく切って乾燥させてください。

※洗剤、薬品や熱湯は衛生上のトラブル故障の原因となります。

困った時に

故障かな？と思ったら

こんなとき	考えられる原因	処置
電源入らない	バッテリーの残量が不足している	2時間充電して試してください
水の出が悪い	ノズルやノズルヘッドの穴にゴミや塩の結晶がつまっている	ようじなど細い棒を差し込んで取りのぞいてください
	バッテリーの残量が不足している	2時間充電して試してください
勝手に止まる	操作後から2分以上経過している	2分経過後自動OFF機能が働きます。故障ではありません
	バッテリーの残量が不足している	2時間充電して試してください
液漏れがある	ノズルヘッドの最後まで取り付けない	ノズルヘッドの最後まで取り付けてください
	ノズルがよく取り付けけない	「カチッ」という音が聞こえるまで取り付けてください

こんなとき	考えられる原因	処置
液漏れがある	ノズルのシールリングが正確に取り付けない	ノズルのシールリングが正確に取り付けてください
	給水口のキャップがしっかり閉まらない	給水口のキャップをしっかりと閉めてください
	鼻洗浄中、器具を45度以上傾ける	鼻洗浄中、器具を45度以上傾けないでください
充電できない	充電ポートに水がある	乾いた布で軽く拭いた後、乾燥させてください。充電ポートが完全に乾燥してから、充電を試みてください
	充電ポートに塩の結晶がある	まず少し湿らせた布で塩を優しく拭き取ってください。その後、乾いた布でしっかりと乾燥させてください。充電ポートが完全に乾燥してから、充電を試みてください

主な仕様

販売名	電動鼻用洗浄器 ME117	
分類	一般医療機器	
製造販売届出番号	13B2X10479302041	
電源	リチウムイオン電池内蔵(Type-C充電式)	
対応ACアダプタ	定額出力DC5V 1A（市販品）（付属しない）	
タンク容量	最大150mL	
防水性	IPX7	
使用環境	温度：5℃~40℃ 湿度：≤90% 気圧：70~106kpa	
保管環境	温度：-10℃~55℃ 湿度：≤90% 気圧：70~106kpa	
パッケージ内容	洗浄器本体 x 1 噴霧型ノズル x 1 水柱型ノズル x 1 大人用ノズル x 1 子供用ノズル x 1 収納袋 x 1 充電ケーブル x 1 取扱説明書 x 1	

記号用語集

記号	説明	記号	説明
	Type Bf 適用部品		直射日光を 避けて保存
	天地無用		壊れ物、 取扱 注意
	水漏注意		保護遮断：保護 クラスIIのデバイス
IPX7	防水ラベル		廃棄物処理 ステータス
	製造元		電源ボタン
MD	医療機器		取扱説明書を 参照してください
	注意事項について 取扱説明書を参照 してください	— max —	最大容量

保証とアフターサービス

保証規定

1.取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内（本体のみ:1年）に故障した場合に限り品質を保証しております。

万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- (01) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- (02) 取扱い不注意による故障および損傷
- (03) 不当な修理や改造による故障および損傷
- (04) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
- (05) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- (06) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
- (07) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- (08) 暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦国内紛争・戦争・その他不可抗力により発生した故障および損傷
- (09) 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
- (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
- (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
- (12) 保証書のご提示がない場合
- (13) 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・ご住所・販売店名の記入がない場合

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名または型番	MEDIKEN 鼻用洗浄器 ME117		
販売店名			
注文番号			
お買い上げ年月日	年 月 日	保証期間	1年
お客様名	ご住所		
	お名前		
	TEL		



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加

📞お気軽にお問い合わせください

■製品のお問い合わせ

■修理のご依頼

■別売品や消耗品のご注文

■初期不良