


mediken

電動鼻用洗浄器 ME129

取扱説明書

届出番号：13B2X10479302049

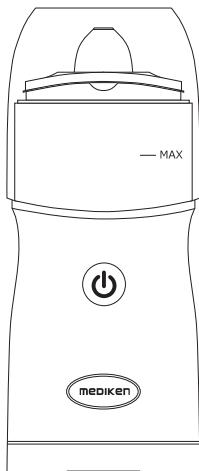

このたびは、メディケン製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくため、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加

📞 お気軽にお問い合わせください

- | | |
|---------------|----------|
| ■ 製品のお問い合わせ | ■ 修理のご依頼 |
| ■ 別売品や消耗品のご注文 | ■ 初期不良 |

警告

- 内耳または鼓膜の手術後の方、鼓膜損傷のある方、口腔や咽喉部に損傷がある方または手術直後の方、神経疾患により操作に従うことが難しい方、認知症の方、てんかんの方、血液疾患のある方、重篤な感染症の方。
- 新生児および妊婦はご使用に際して注意が必要です。
- 幼児の手の届かない場所に保管し、誤飲による危険を防いでください。
- 本製品を分解したり、指定外のアクセサリを使用したりしないでください。製品の損傷の原因となります。
- 本製品を改造しないでください。予期せぬ故障の原因となります。
- 爆発性、可燃性、または腐食性ガスが存在する環境での使用は厳禁です。
- 強力な電磁干渉のある環境では使用しないでください。故障の原因となります。

警告

鼻腔と中耳の圧力には常に注意してください。鼻づまりのある方の場合、洗浄液の流れが鼻腔や中耳に過度の圧力をかけ、不快感を引き起こすことがあります。その場合は、片方の鼻孔ずつ洗浄し、洗浄液を鼻孔から戻すようにしてください。その際は、ノズルで鼻孔を塞がないように注意してください。使用中または使用後に中耳に強い不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。使用後4分間は鼻をかまず、ティッシュで軽く押さえて鼻腔内の水分を排出してください。鼻をかむと中耳の圧力が高まり、不快感を引き起こす可能性があります。片方の鼻孔の使用時間は4分を超えないようにしてください。

使用環境温度の範囲を超えた環境に置かれた場合、使用前に通常の動作温度環境で4時間以上放置してください。通常の使用条件を超える環境での使用は、製品寿命を短くする可能性があります。

注意

- 本製品は鼻腔洗浄専用です。他の用途には使用しないでください。
- 洗浄液を直接目や耳に向けると、傷害を引き起こす可能性があります。

以下の場合には使用しないでください。

- 目、耳、口腔には使用しないでください。
- 内耳または鼓膜の手術後。

- 口腔や咽喉部に損傷がある場合、または手術直後。
- 耳鼻科または眼科の疾患がある方、または過去にそのような疾患があった方は、医師の指導のもとで使用してください。
- 鼻腔内に傷がある方、塩化ナトリウム代謝障害またはアレルギー体質の方は、医師の指導のもとで使用してください。
- 鼻を十分にかめない方。
- 風邪や重度の鼻づまりの場合。
- 使用中に耳、鼻、目などに異常や不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると健康に害を及ぼす可能性があります。
- 高齢者、子供、乳幼児、自分で操作できない方、鼻粘膜が弱い方は使用しないでください。
- 子供は保護者の指導のもとで使用してください。けがの原因となる可能性があります。
- 常に製品を清潔に保ち、鼻腔洗浄には必ず新鮮な温水を使用してください。
不潔な状態で使用を続けると、カビや細菌が繁殖し、健康に害を及ぼす可能性があります。また、異臭が発生したり、製品が故障したりする可能性があります。
- 使用後は、ウォータータンクに残った生理食塩水を捨て、再度清水を入れてノズルやポンプ内の塩分を完全に洗い流してください。
- 塩分を完全に除去しないと、塩分が配管に詰まり、噴射できなくなることがあります。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出し、液漏れによる製品の損傷を防いでください。

使用上の注意

- 本製品は原則として同一の使用者のみが使用してください。交差感染を防ぐため他の方と共用しないでください。
- 直射日光、高温多湿、水しぶきの環境下での保管は避けてください。
本体表面に汚れや洗浄液の残留がある場合は、清潔な柔らかい布に
- 75%の医療用アルコールを含ませ、絞ってから軽く拭き取り、医療用ガーゼで水分を拭き取ってください。
- ※ 本体を水洗いしないでください。内部に水が入り、故障の原因となります。内部への浸水に注意してください。
- ※ 医療用アルコール以外の揮発性液体（ベンゼンなど）で拭かないでください。
- 煮沸消毒はしないでください。プラスチック部品が損傷する可能性があります。

- 環境温度が5℃未満または40℃を超える場合は使用しないでください。
- 爆発物、可燃性液体、または可燃性ガスの近くでは使用しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使用前には必ず清掃してください。
- 清潔で風通しが良く、高温多湿、ほこり、有毒ガス、または腐食性ガスのない環境で使用してください。
- ウォータータンクは使用后必ず空にし、ノズルとウォータータンクを洗浄してください。
- 本体は防水構造ではありません。水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。

使用目的、効能又は効果

鼻腔内部および鼻腔奥を洗浄し、鼻の機能を改善するための洗浄器です。

花粉症の緩和、アレルギー性鼻炎の緩和、風邪の予防と軽減に役立ちます。

一般家庭向けに設計されています。


電池に関する注意

電源仕様

電源：単3形乾電池2本（1.5V）。

電池の交換

底面の電池カバーを開け、消耗した乾電池を新しい乾電池に交換してください。正極と負極を確認してください（電池室の近くに極性の表示があります）。電池カバーを閉めてください。

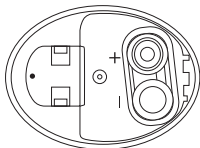

注意

電池残量が少なくなるとインジケータランプが点滅します。新しい電池に交換してください。

噴射効果を保つため、耐久性の高い乾電池を使用してください。

連続使用時間

電動鼻用洗浄器は、電池が十分な場合、少なくとも1時間連続使用できます。

注意：長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。液漏れによる製品の損傷を防ぎます。

長期間使用しない場合

乾電池を入れたまま長期間放置しないでください。以下の問題が発生する可能性があります。


- 乾電池は自然放電し、内部でガスや液体が発生して液漏れを引き起こすことがあります。
- 漏出した液体は腐食性があり、製品の金属接点、基板、外装を損傷する可能性があります。
- 電源がオフの状態でも微弱な電流が流れ、電池が早期に消耗することがあります。
- 液漏れまたは損傷した電池は、皮膚や目への傷害を含む安全上のリスクをもたらす可能性があります。
- 取り外した電池は、涼しく乾燥した場所に保管し、金属製品との接触を避けてください。故障の危険があります。

警告



許可なく製品を分解または修理しないでください。

取り外した電池は、涼しく乾燥した場所に保管し、金属製品との接触を避けてください。故障の危険があります。

製品構造

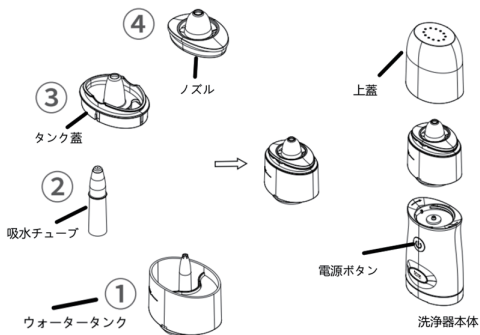


部品の取り外し方法

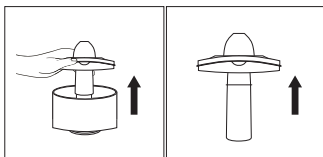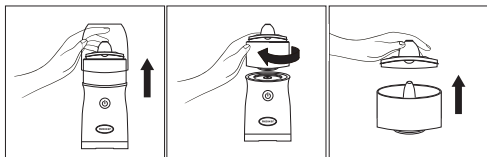

上に押し込んで、吸水チューブを取り付けます

部品の取り外した後

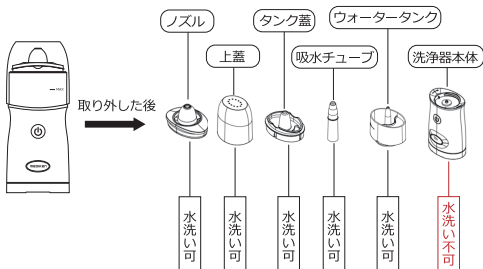

使用方法

使用前の注意

1. 初回使用時または長期間保管後は、まず清水で洗浄してから使用してください。
- ※ ノズル表面に異物が付着していないことを確認してください。
- ※ 使用前は、本体を水平で安定した場所に置いてください。
- ※ 洗浄時は、やや前かがみになり、頭を前に傾けると効果的です。

安全上の注意

ノズルは個人専用とし、共用を避けてください。

使用前に電池カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。

水分の侵入による故障を防ぎます。

洗浄液には0.9%の生理食塩水を使用するか、医師の指導に従って適切な洗浄液を選択してください。

片方の鼻腔に10～15mLを使用することを推奨します。個人の状態や医師の指示に応じて量を調整してください。

準備

1. 底面の電池カバーを開け、単3形乾電池2本を正しい極性で挿入してください（電池室の近くに極性の表示があります）。電池カバーを閉めてください。
2. 生理食塩水または専用洗浄液（MAX:25mL）をウォータータンクに注入してください。

※注入時は正しい位置を確認し、液体が溢れないように注意してください。

※生理食塩水を入れた後は、製品を逆さにしたり、蓋を開けたり、激しく振ったりしないでください。液体が漏れる可能性があります。
ノズルを取り付けてください。

3. ウォータータンク、ノズル、吸水チューブ、上蓋、タンク蓋の取り付け方法については、「製品構造」を参照してください。

4. ウォータータンクを本体に取り付け、時計回りに回して固定してください。

使い方

1. 洗浄の開始

製品を軽く持ち上げ、ノズル先端を片方の鼻孔に合わせてください。
電源ボタンを押して洗浄を開始し、口で呼吸しながら「アー」と声を出してください。

洗廃液は同じ側の鼻孔から流れ出て、自動的に廃液タンクに回収されます。



2. 洗浄の停止

再度電源ボタンを押すと停止します。

片方の洗浄が終了したら、同じ方法でもう一方の鼻腔を洗浄してください。

3. 操作上の注意

ノズルを鼻腔に強く押し込まないでください。損傷の原因となります。
片方の鼻腔の洗浄時間は4分を超えないでください。連続運転時間が4分を超えると自動的に電源が切れます。

使用中に耳、鼻、目に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

休憩を挟まずに30分以上連続使用しないでください。製品の過熱を防ぎます。

4. 使用後の手順

電源ボタンを押して製品をオフにしてください。

ウォータータンクに残った生理食塩水を捨ててください。

ウォータータンクを本体から外し、水洗いしてください。

※ウォータータンクを本体に付けたまま洗浄しないでください。内部や電池室に水が入り、故障の原因となります。

使用後は各部品を洗浄し、完全に乾燥させてから保管してください。

使用済みのノズルは洗浄・消毒し、完全に乾燥させてから本体に取り付け、他の部品と一緒に保管してください。

お手入れ方法

メンテナンス方法

注意：煮沸消毒はしないでください。各部品を洗浄後、完全に乾燥させてから保管してください。

本体の防水等級はIP22（日常生活防水）ですが、直接水をかけないでください。

高温多湿および直射日光の当たる場所での保管は避けてください。

本体

表面に汚れや洗浄液の残留がある場合は、清潔な柔らかい布に75%の医療用アルコールを含ませ、絞ってから軽く拭き取り、医療用ガーゼで水分を拭き取ってください。

※ 本体を水洗いしないでください。内部への浸水に注意してください。

※ 医療用アルコール以外の揮発性液体（ベンゼンなど）で拭かないでください。

ノズル

ノズルを本体から外し、清水で洗浄してください。

※ 洗浄後は水分を拭き取るか、完全に乾燥させてください。

洗剤、化学薬品、または熱湯は使用しないでください。衛生上の問題や製品の損傷を引き起こす可能性があります。

ウォータータンク

ウォータータンクを本体から外し、清水で洗浄してください。

※ 洗浄後は水分を拭き取るか、完全に乾燥させてください。

※ 洗剤、化学薬品、または熱湯は使用しないでください。衛生上の問題や製品の損傷を引き起こす可能性があります。

消毒方法

消毒前に、製品を完全に清掃してください。

消毒方法：75%の医療用アルコールで洗浄器の各部品の表面を拭き、汚染された表面全体をアルコールで消毒してください。すべての表面が完全に乾燥してから、製品を使用してください。



警告：本製品は低温/高温消毒またはガンマ線滅菌には対応していません。

注意事項

1. 使用後は上記の方法で清掃・消毒を行い、残留液による次回使用時の影響を防いでください。
2. 先端が鋭利な硬い物で表面を拭かないでください。
3. 製品の寿命中は特別なメンテナンスは不要ですが、電池は少なくとも6か月に1回交換してください。そうしないと、電解液の漏れにより製品が損傷する可能性があります。

予防点検

製品の使用頻度に関係なく、少なくとも月に1回は点検を行ってください。

使用前に製品表面に損傷がないか、乾電池の液漏れがないか、本体、吸水チューブ、タンク蓋、ノズル、ウォータータンク、上蓋が完全に詰まっていないか確認してください。

適合基準

EMC適合

本製品はEMC規格IEC 60601-1-2に適合しています

困った時に

故障かな？と思ったら

こんなとき	考えられる原因	処置
電源を入れても正常に動作しない	電池切れ	乾電池を交換してください
	洗浄液が入っていない、または量が不足している	ノズルの洗浄液の状態を確認してください
	電源ボタンが固着している	ボタンの動きを確認してください
噴射量が少ない	洗浄液が不足している	洗浄液を補充してください
	製品が正しく組み立てられていない	再度組み立ててから起動してください
使用中に突然電源が切れる	電池切れ	乾電池を交換してください
	使用中に製品が激しく振動している	製品をしっかりと固定して使用してください
洗浄液がなくなっても自動停止しない	洗浄液の泡がノズルに残っている場合がある	電源ボタンを押して停止し、ノズルの泡を洗浄してください
ノズルから洗浄液が漏れる	破損またはプラスチックの劣化	ノズルを交換してください

主な仕様

販売名	電動鼻用洗浄器 ME129
ブランド	Mediken
分類	一般医療機器
製造販売届出番号	13B2X10479302049
電源	単3形乾電池2本（1.5V）
流量	10mL/min（±3mL/min）
タンク容量	最大容量25mL（±5mL）
防水等級	IP22
インジケータ	電池残量低下時に点滅
使用環境	温度：5℃～40℃ 湿度：≤90% 気圧：70～106kPa
保管環境	温度：-10℃～55℃ 湿度：≤90% 気圧：70～106kPa
パッケージ内容	洗浄器本体x1、単3形乾電池x2、 吸水チューブx1、タンク蓋x1、 ノズルx1、上蓋x1、取扱説明書x1

記号	説明	記号	説明
	Type Bf 適用部品		直射日光を 避けて保存
	天地無用		壊れ物、 取扱 注意
	水漏注意		保護遮断：保護 クラスIIのデバイス
	廃棄物処理 ステータス	IP22	IP 保護等級
	電源ボタン		医療機器
-max-	最大容量		注意事項について 取扱説明書を参照 してください
	製造元		取扱説明書を 参照してください

保証規定

1. 取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内(本体のみ:1年)に故障した場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内に故障した場合は、お客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - (2) 取扱い不注意による故障および損傷
 - (3) 不当な修理や改造による故障および損傷
 - (4) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - (5) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (6) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (7) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - (8) 暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦国内紛争・戦争・その他不可抗力により発生した故障および損傷
 - (9) 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
 - (12) 保証書のご提示がない場合
 - (13) 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・ご住所・販売店名の記入がない場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名または型番	MEDIKEN 電動鼻用洗浄器 ME129		
販売店名			
注文番号			
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	1年
お客様名	お名前		
	電話番号		
	ご住所		

製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

さらに、SNSをフォローしていただくと、
お得なキャンペーンや限定情報をご覧いただけます。

HP: <https://www.mediken.net/>
Line: @mediken Email: support@mediken.net

