


MEDIKEN

首サポーター ME135

取扱説明書

届出番号: 13B2X10479302050

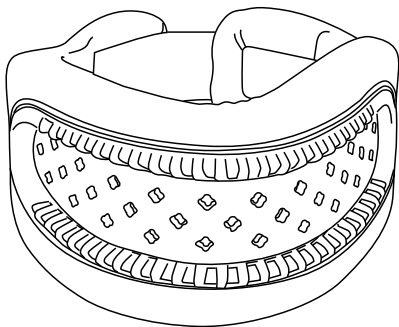

このたびは、メディケン製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくため、使用前に必ず
本取扱説明書をお読みください。



LINE公式アカウントを今すぐ友だち追加

📞 お気軽にお問い合わせください

- | | |
|---------------|----------|
| ■ 製品のお問い合わせ | ■ 修理のご依頼 |
| ■ 別売品や消耗品のご注文 | ■ 初期不良 |

はじめにお読みください

- 本品は補助目的の製品で、治療効果はありません。
使用前に症状がある場合は医師にご相談ください。
- 本品は使用状況により、サポートできない場合があります。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。
サイズ表は本取扱説明書のP.3にあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本取扱説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

-  **警告** …… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容。
-  **注意** …… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容。

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。



【禁忌・禁止】

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 頸部以外の部位に使用しないでください。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体はきつく締めすぎないでください。喉を圧迫する場合は、少しゆるめに調節してください。





警告

- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本製品の改造、加工、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

マジックテープ(メス面)

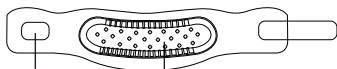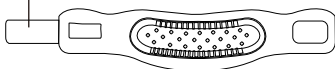

マジックテープ(オス面)

シリコン

<付属品>



マジックテープ(メス面)

※洗濯する際は、衣類を傷つけないよう、あらかじめマジックテープは貼り付けた状態にしてください。

用途

頸部の固定。

対象者

- 長時間デスクワークなどで同じ姿勢を続けるオフィスワーカーの方。
- スマートフォンやタブレット端末を長時間使用する「スマホ首」「ストレートネック」傾向のある方。
- 頸椎手術後または怪我の後に、頸部の固定・安静が必要な方。
- 学習や読書などで姿勢の乱れが気になる方。
- 日常生活の中で、より快適で質の高い暮らしを目指す方。

首サポーターの力学的サポートについて

首サポーターは、物理的な支えによって首への負担を軽減します。首を安定させ、頭の重さを分散し、首の過度な前傾・後傾・回旋を防ぐことで、筋肉の緊張や痛みを和らげます。また、首の自然なカーブを保つのを助け、神経や関節を保護し、悪い姿勢による負荷を軽減します。

なお、首サポーターはあくまで補助的な役割であり、医療行為の代わりにはなりません。

サイズ	首周り(cm)	首の高さ(cm)
フリー	38~52	8~10



首の測り方


メジャーで首の周り(首囲)を一周させて測ります。
鎖骨から顎までの距離(首の長さ)を測ります。

装着手順

※本品は「上:あご側(※くぼみ)」が上向きになるようにし、マジックテープのメス面(柔らかい面)が内側(肌に触れる面)になるように装着してください。

<製品の裏側>

【上:あご側】
(※くぼみ)

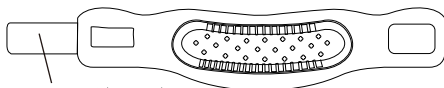


マジックテープ(メス面)


【下:鎖骨側】

1 本体中心のくぼみにあごを合わせます。


2 あごが本体の上にしっかり乗るように首に巻き、位置を調整してください。

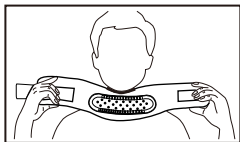

3 マジックテープ(メス面)と(オス面)を重ねてしっかりとめてください。マジックテープで適切なサイズに調節できます。

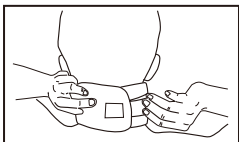

※本体のゆるみやずれがないかを確認してください。違和感がある場合は、再度、最初から装着し直してください。

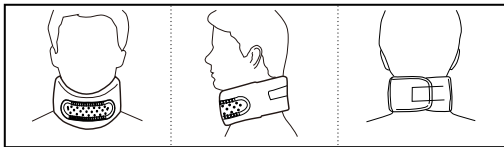

【お手入れ方法】

⚠ 警告

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地へ色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。マジックテープが他の衣類につくと、ほつれや伝線の原因となります。

- 本品は手洗いをおすすめします。やさしく押し洗いを行い、洗浄後は絞らず、タオルで水分を吸い取るか、押し水気を取り、日陰で吊り干ししてください。
- 洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットを使用し、洗浄後は日陰で吊り干ししてください。
- ※洗濯ネットがない場合は、付属のマジックテープ(メス面)をマジックテープ(オス面)に貼ってから洗濯してください。衣類を傷つける心配はありません。
- ※洗濯時は、付属のマジックテープ(メス面)をマジックテープ(オス面)に貼ってください。固定せずに洗うと、マジックテープの粘着力が低下する場合があります。
- アイロンや塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用可能です。
- 乾燥機は使用しないでください。製品を損傷する原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。ウェットクリーニングは可能ですが、タンブル乾燥は避けてください。

主な仕様

販売名	首サポーター ME135
ブランド	Mediken
分類	一般医療機器
製造販売届出番号	13B2X10479302050
素材	表地:ポリエステル 中材:高反発スポンジ(ポリウレタン) 芯材:シリコーン マジックテープ(メス面):ナイロン+ 超極細繊維 マジックテープ(オス面):PP (ポリプロピレン)
サイズ	580mm×95mm×22.6mm (マジックテープを含めて測定)
重量	約121g
パッケージ内容	首サポーター本体×1、マジックテープ (メス面)×1、透明収納袋×1、 取扱説明書×1

保証とアフターサービス

保証規定

1. 取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内(本体のみ:1年)に故障した場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障した場合は、お客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - (1)取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷。
 - (2)取扱い不注意による故障および損傷。
 - (3)不当な修理や改造、加工による故障および損傷。
 - (4)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (5)火災・地震・水害・落雷・その他天変地異などによる故障および損傷。
 - (6)車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷。

- (7)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (8)暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦国内紛争・戦争・その他不可抗力により発生した故障および損傷。
 - (9)弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷。
 - (10)消耗品、本体以外の付属品の消耗。
 - (11)磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換。
 - (12)保証書のご提示がない場合。
 - (13)保証書にお買い上げ年月日・お客様名・ご住所・販売店名の記入がない場合。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名または型番	MEDIKEN 首サポーター ME135		
販売店名			
注文番号			
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	1年
お客様名	お名前		
	電話番号		
	ご住所		

製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

さらに、SNSをフォローしていただくと、お得なキャンペーンや限定情報をご覧いただけます。

HP: <https://www.mediken.net/>

Line: @mediken

Email: support@mediken.net

