


MEDIKEN

巻き爪矯正器具 **ME137**

取扱説明書

届出番号: 13B2X10479302056

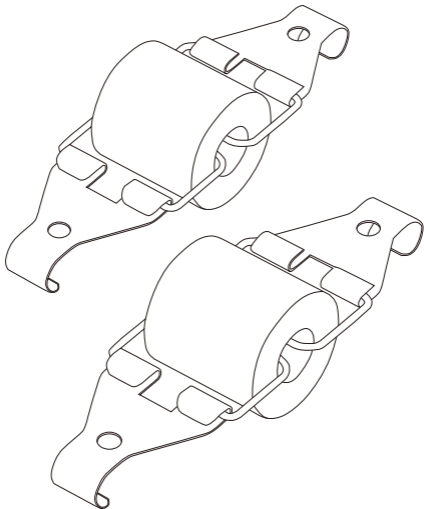


Ver1.0

1.付属品

パッケージ内容をご確認ください。



□ステンレス製ピンセット

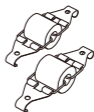

□矯正器具×2個



□装着補助クリップ



□取扱説明書

2.安全上のご注意

本取扱説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠ 警告 …… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容。

⚠ 注意 …… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容。



禁忌・禁止

- 爪に割れや亀裂などがある方、また、爪が極端に薄いまたは弱い方は使用しないでください。
- 爪の周辺に、化膿、炎症、湿疹など皮膚に異常がある方は使用しないでください。
- 本品やその構成材料に対し、アレルギーまたは過敏症のある方は使用しないでください。
- 重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方は使用を避けてください。



注意

- 本品は軽度から中度の巻き爪を対象としています。爪の食い込みがきつい方や重度の巻き爪の方はフックが引っかからない場合があります。
- ご使用開始時は、1日1～2時間程度から装着し、痛みや不快感がないことを確認してください。問題がなければ、装着時間を徐々に延ばしていきます。



警告


- 使用中や使用後に、痛み、発疹、かゆみ、赤み、うっ血などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本品及び付属品を本来の目的以外に使用したり、改造して使用することはおやめください。

3.製品紹介


【形状】-矯正器具本体

ゴムリング

ステンレス製の鉤

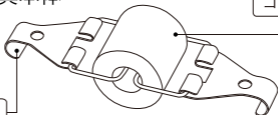

【サイズ】

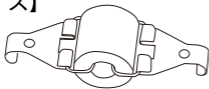

適用ネイルサイズ：16-18mm



適用ネイルサイズ：19-21mm

【材質】

本体構造

鉤（フック）部分：ステンレス鋼
弾性機構部：高弾性ゴムリング

【原理】

巻き爪の両端にステンレス製の鉤（フック）を装着し、高弾性医療用ゴムリングが持続的かつ均一な水平収縮力を発生させる。この力が巻き込んだ爪を両側から平らに引き伸ばし、正常な成長方向へと矯正し、痛みを緩和するとともに、再発を防止する。

【使用目的又は効果】

- ・物理的な牽引により、巻き爪を矯正
- ・食い込みによる痛みを和らげる
- ・爪周囲炎（そうしゅういえん）の予防・再発防止

4.装着手順



【ご注意】ご使用には慣れが必要な製品です。本取扱説明書をよくお読みいただき、正しい方法でお使いください。

【装着前の準備】

使用前に爪を2mm以上伸ばし、爪の先をまっすぐにする。

2mm
以上
伸ばす

まっすぐにする



【使用方法】

1



装着補助クリップのハンドルを握り、クリップの自然に開いている側の先端を閉じた状態にします。

2




クリップの先端に矯正器具を取り付けてから、力を緩めます。

3



ステンレス製の鉤（フック）の位置をあらかじめ調整します。

4

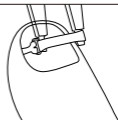


爪の片側に、鉤（フック）をしっかり引っ掛けます。




5

もう片方の鉤（フック）も爪に
しっかり引っ掛けます。

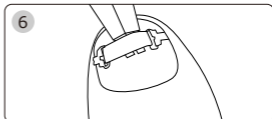


6

クリップのハンドルを握り、
取り出します。

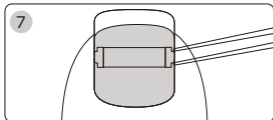

7

ピンセットで鉤（フック）の位置を
微調整し、適切な位置に調整します。

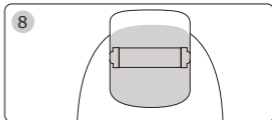

8

完成です。

主な仕様

販売名	巻き爪矯正器具 ME137
ブランド	Mediken
分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X10479302056
パッケージ内容	矯正器具×2、装着補助クリップ×1、 ステンレス製ピンセット×1、 取扱説明書×1

【保管方法及び使用期限等】

- 本品及び付属品を幼児や小児の手の届かない場所で保管してください。
- 直射日光、高温多湿を避け、室温で保管してください。
- 製品の手入れには中性洗剤を用い、シンナーなどの強い溶剤は使用しないでください。
- 衛生面および矯正効果を維持するため、ご使用推奨期間は装着後30日間です。
定期的に新しい製品と交換してください。
ご使用後の改善期間には個人差があり、一般的には1～2ヶ月を目安としております。

【保守・点検に係る事項】

- ご使用前に、本製品に異常がないか必ず確認してください。

アフターサービス

製品の仕様や利用方法についてのご質問、またはご意見などがございましたら、QRコードをスキャンしてお問い合わせ内容をご記入ください。
初期不良が発生した場合は、迅速に交換などの対応をいたします。

Email: support@mediken.net

営業時間: 平日 10:00～18:00 (※土日祝日、年末年始を除く)

